

Compugroup Medistar


Medistar GDT Anbindung von HMS

Einstellungen in Medistar

Um die GDT-Schnittstelle für die Anbindung von HMS in Medistar nutzen zu können, muss die GDT-Schnittstelle vollständig installiert sein.

(Die Dateien „fm_gdt*.“ im Medistar -Ordner „form“ und „ga_gdt*.“ im Medistar-Ordner „inst“ müssen vorhanden sein)

1. Aufrufen des Formularmanagers: Im Index Installation -> System-Kommandos aufrufen und dort „fasm“ eingeben. Dann „F1“ für die Formularliste.
2. Falls bereits eine GDT Anbindung unter Medistar existiert, suchen Sie das Formular mit der Bezeichnung GDT, drücken die Eingabetaste und machen bei Punkt 5 weiter. Falls noch keinerlei Anbindung für GDT eingerichtet wurde, suchen Sie einen freien Formularplatz und drücken die Eingabetaste.

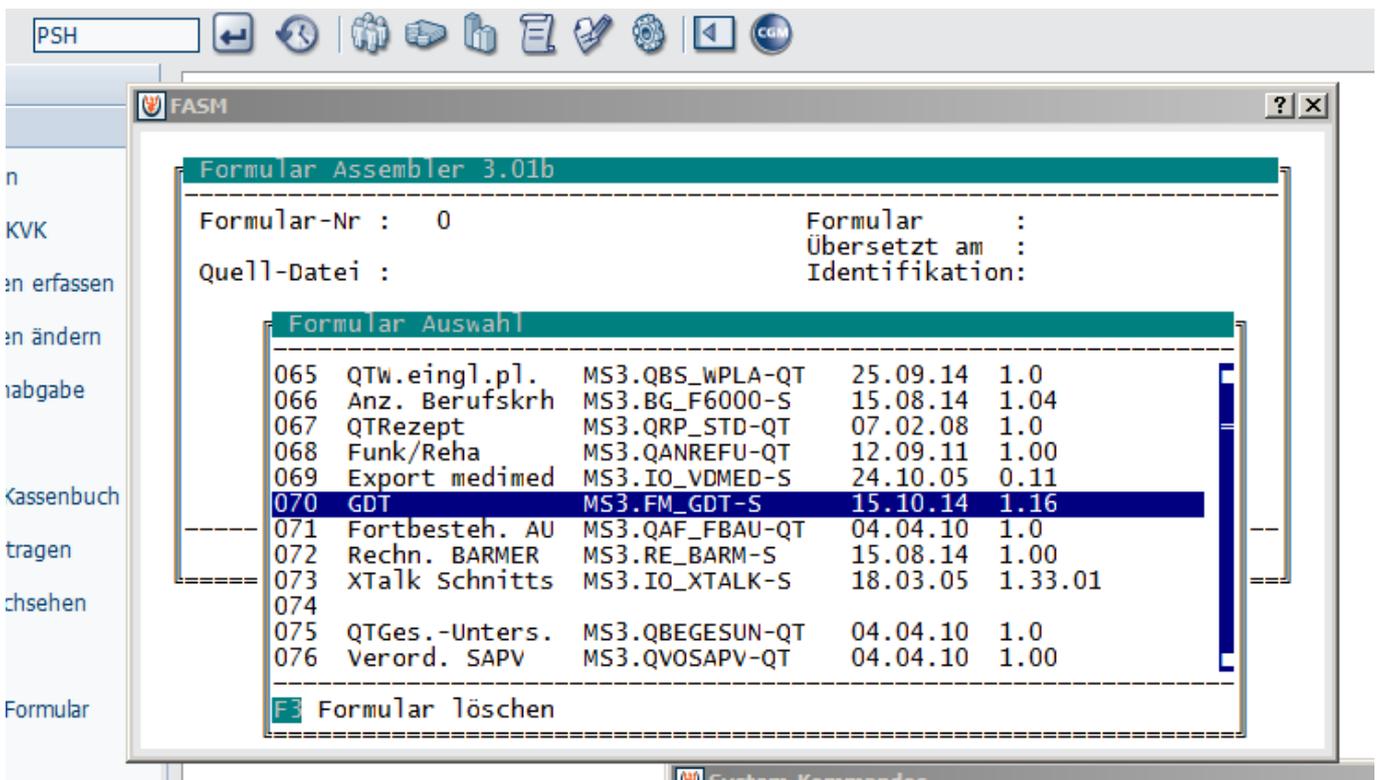

3. Im Feld „Quelldatei“ folgende Eintragung machen: „MS3.FM_GDT-S“
Eingabetaste drücken


4. Wählen Sie „Formularcode einlesen“ und drücken die Eingabetaste

5. Wählen Sie „Einstellung bearbeiten“ und drücken die Eingabetaste

Geben Sie nun folgende Zeilen ein ab dem 1. freien c_mtext_* ein (Sternchen ist hier Platzhalter). Beachten Sie, dass bereits bestehende Einträge nicht

Compugroup Medistar

überschrieben werden dürfen, da sonst andere Anbindungen nicht mehr

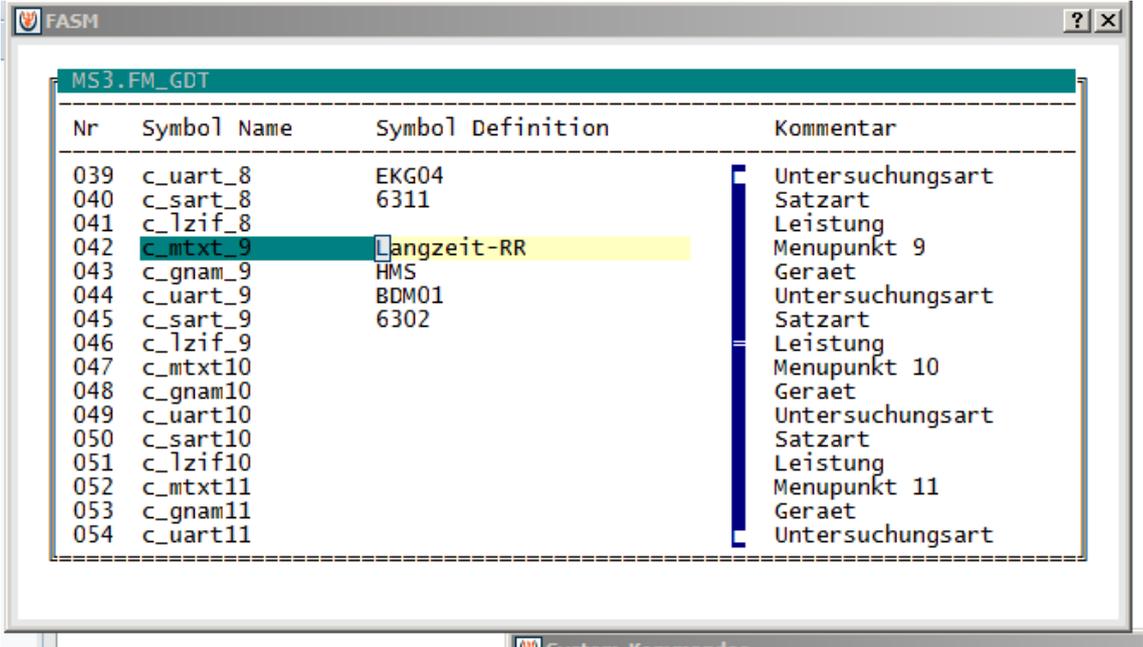

Nr	Symbol Name	Symbol Definition	Kommentar
039	c_uart_8	EKG04	Untersuchungsart
040	c_sart_8	6311	Satzart
041	c_lzif_8		Leistung
042	c_mtxt_9	Langzeit-RR	Menupunkt 9
043	c_gnam_9	HMS	Geraet
044	c_uart_9	BDM01	Untersuchungsart
045	c_sart_9	6302	Satzart
046	c_lzif_9		Leistung
047	c_mtxt10		Menupunkt 10
048	c_gnam10		Geraet
049	c_uart10		Untersuchungsart
050	c_sart10		Satzart
051	c_lzif10		Leistung
052	c_mtxt11		Menupunkt 11
053	c_gnam11		Geraet
054	c_uart11		Untersuchungsart


funktionieren.

6. ESC drücken, dann Formularcode einlesen auswählen und mit ESC alles verlassen. Jetzt müssen die GDT Geräte unter Medistar eingerichtet werden.


GDT Gerät einrichten

1. Starten Sie im Medistar-Task die GDT-Schnittstelle, indem Sie im Eingabefeld oben "psh" und dann "ga_gdt" eingeben.

Compugroup Medistar

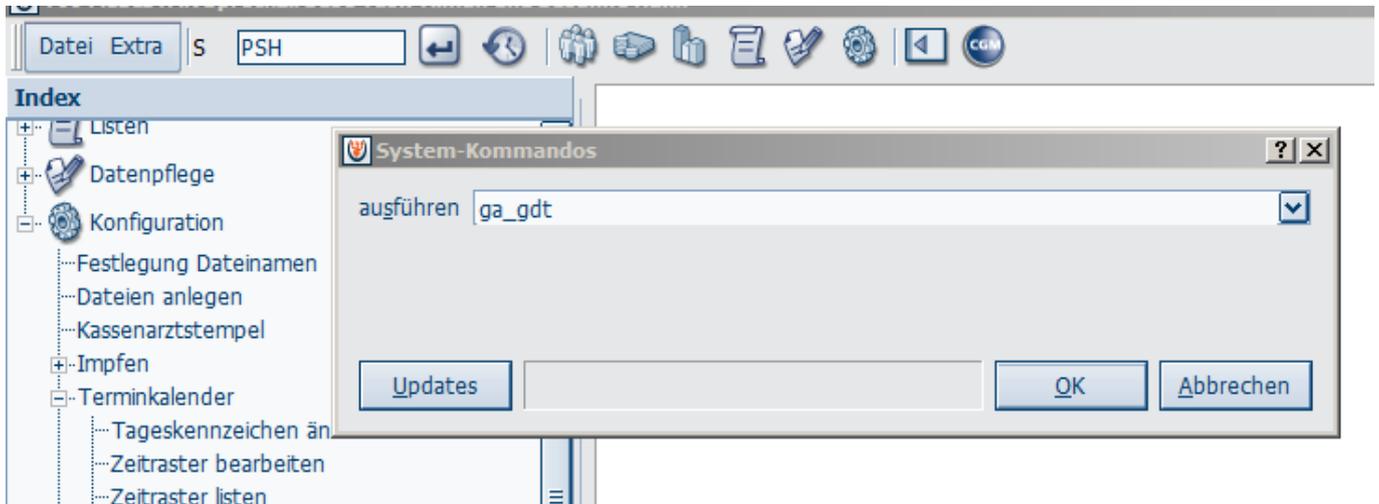

2. Wählen Sie Menüpunkt G „Installation Gerät“ aus und bestätigen Sie die Auswahl

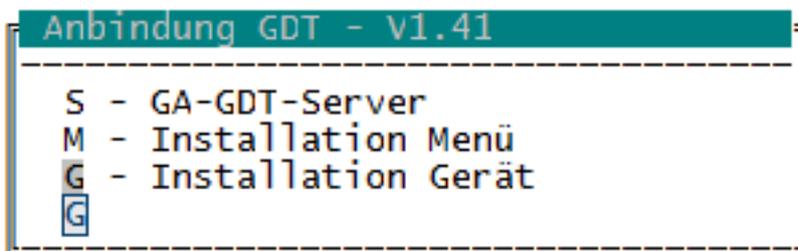


3. Drücken Sie F2, um ein neues GDT-Gerät zu erstellen. Geben Sie unter Bezeichnung

„HMS“ ein. Eine Tasknummer muss nicht eingetragen werden. (Blättern zwischen den Geräten funktioniert mit Bild auf/ab)

4. Geben Sie nun folgende Daten in die Maske ein:

Compugroup Medistar

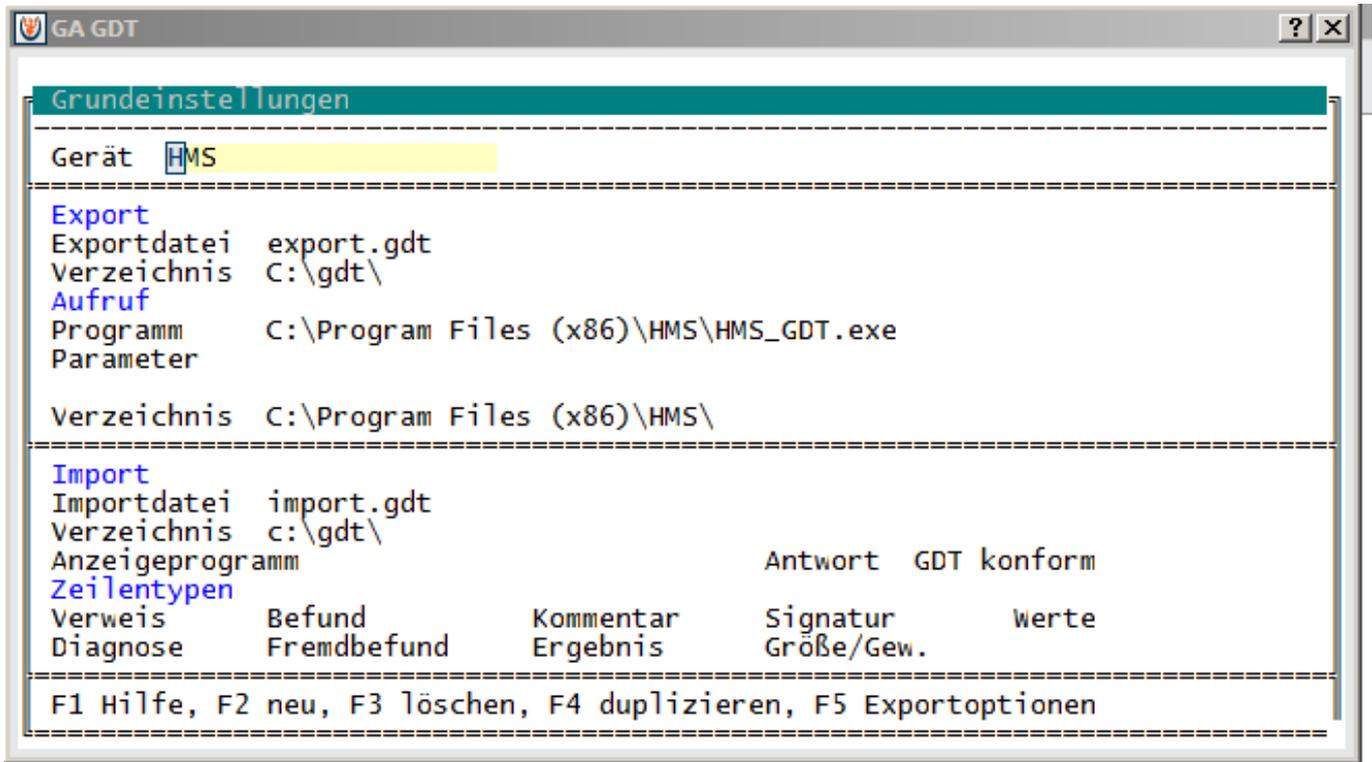

Wichtig ist, dass Sie als Programm HMS_GDT.exe auswählen, weil nur dann über GDT ein Austausch stattfindet. Verlassen Sie das Menü und Speichern die Einstellungen.


Einstellungen von HMS

1. Starten Sie HMS über das Windows Startmenü
2. Wählen Sie unter Einstellungen - > GDT - Einstellungen aus:

Compugroup Medistar



3. Tragen Sie entsprechende Verzeichnisse ein:

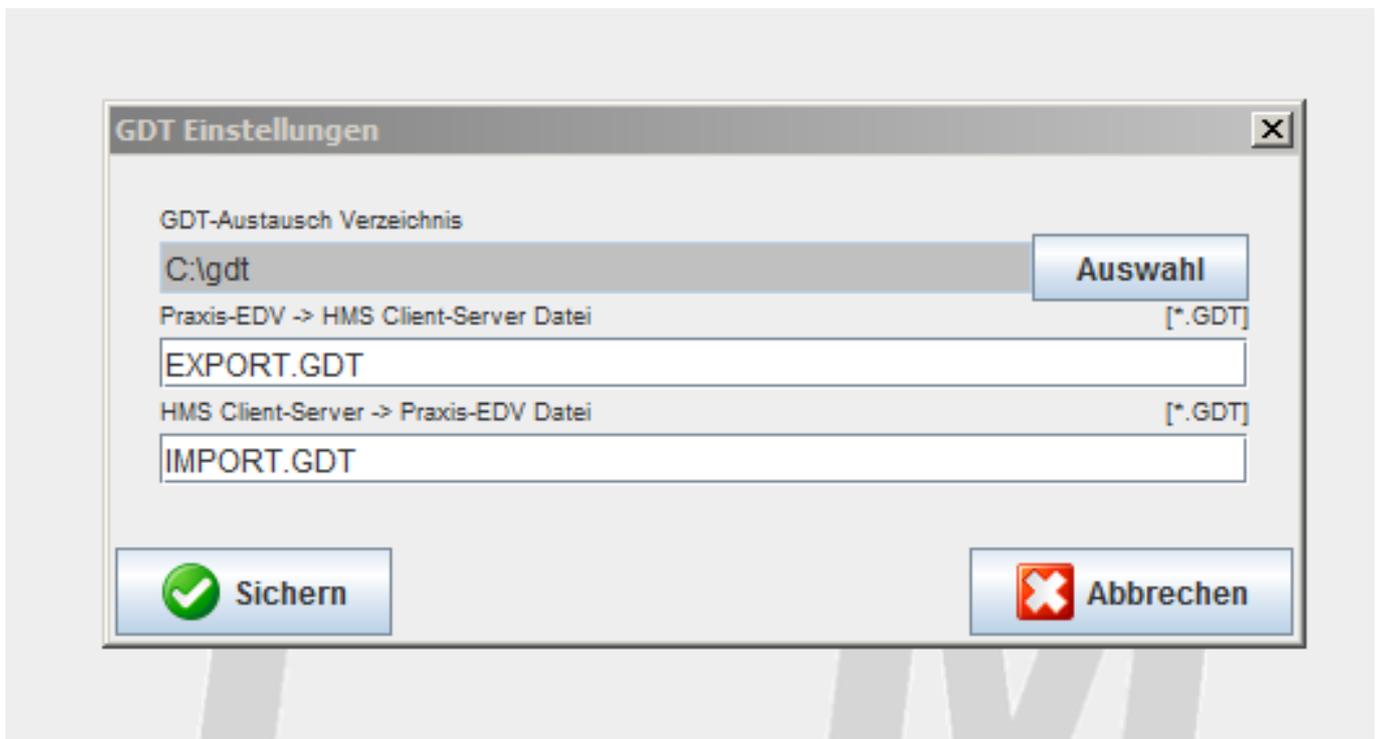

4. Speichern und schliessen Sie die Anwendung.

Das war es. Jetzt können Sie sich entweder unter Medistar entsprechende Makros für den Aufruf einrichten oder den Aufruf über z. B. FA70, falls das GDT Formular die

Compugroup Medistar

Nummer 70 hat, aufrufen.

Eindeutige ID: #1037

Verfasser: Rene Schlacht

Letzte Änderung: 2014-10-15 15:38